

Instructivo uso correcto de termómetro infrarrojo clínico

Uso correcto de termómetro infrarrojo clínico	
Objetivo:	Describir los pasos que se realizaran para controlar la temperatura como medida de control.
Alcance:	Este procedimiento tiene como alcance a todos los trabajadores administrativos, operativos, externos.
Procedimiento:	
<p>Recomendaciones previas al uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asegurar que el orificio del sensor no esté sucio. - El sensor no debe ser tocado ni soplado. - Asegurar que la superficie donde tome la temperatura (Frente o detrás del oído), no se encuentre mojada ni con sudor (debe estar seco). - No medir sobre el cabello, cicatrices u obstáculos que puedan alterar la medición. 	
<p>Durante de la toma de temperatura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ubicar el equipo delante de la persona a evaluar y establecer una distancia de 1 a 5 cm de la superficie a medir. - Accionar el botón para medir temperatura. - Verificar el valor mostrado en la pantalla de visualización. - Si presenta un valor de 37.5°C o más, prohibir el ingreso. - Si va a realizar una nueva medición, puede repetir inmediatamente los pasos del 1 al 4; caso contrario se apagará automáticamente transcurrido unos segundos. 	
<p>Al finalizar la actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se desinfecta y se guarda en el estuche. 	

